



À vos côtés pour vous protéger



Mode d'emploi de
l'outil de planification
des flacons

medrad[®] Intego
Système de perfusion TEP

Étape 1


Entrer l'heure de la mesure de l'activité du produit (ou heure de référence de l'activité) du flacon à doses multiples. Il peut être entré directement dans le champ voulu, dans le format 24 heures. Si le séparateur n'est pas inclus, il sera automatiquement ajouté.

Étape 2

Entrer l'heure à laquelle le dispositif d'administration source du système de perfusion TEP Intego de MEDRAD® sera amorcé.

Étape 3

Entrer l'heure d'administration et la dose du premier patient. Cliquer sur « + » pour ajouter une dose et sur « - » pour effacer une dose.

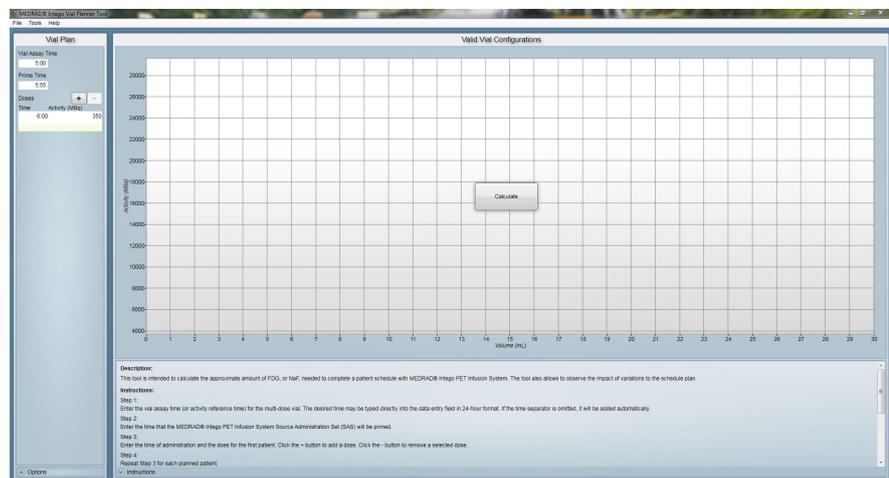


Étape 4

Répéter l'étape 3 pour chaque patient.

Étape 5

Appuyez sur le bouton « Calculer ».

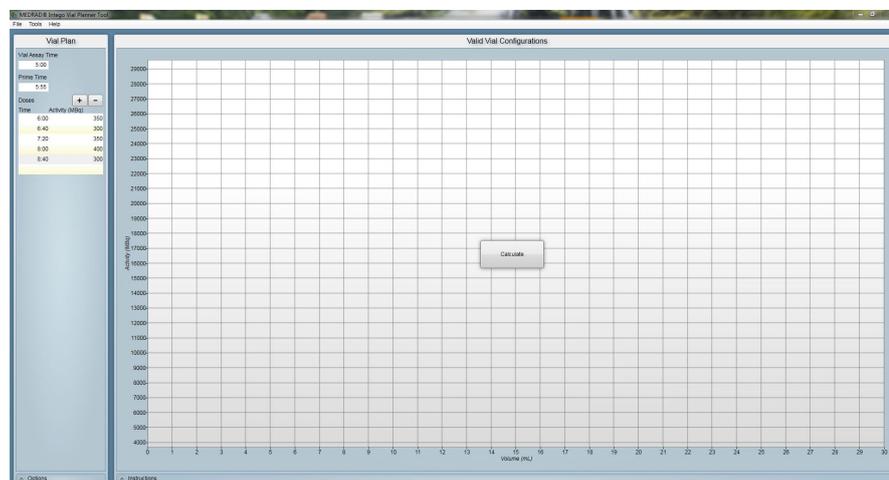

Remarque: Les renseignements affichés sont fictifs et ne représentent pas une dose ou un patient précis.




À vos côtés pour vous protéger




Mode d'emploi de
l'outil de planification
des flacons

medrad[®] Intego
Système de perfusion TEP

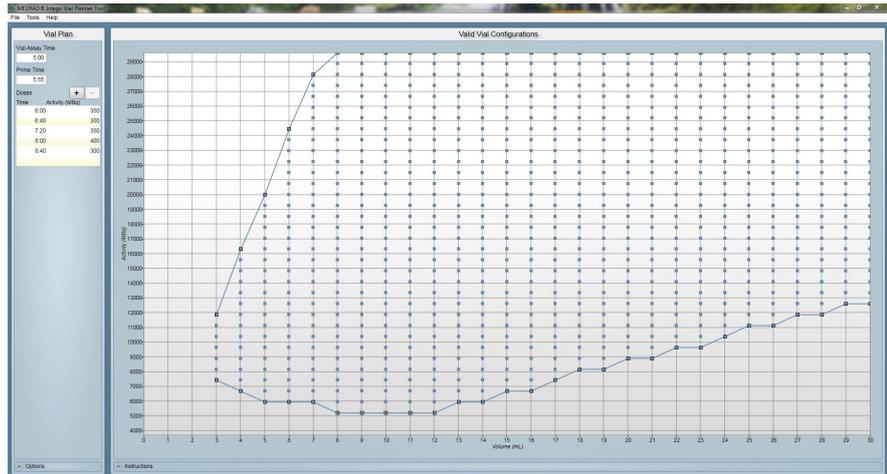

Étape 6

Choisir le volume du flacon et l'activité en fonction du graphique des paramètres valides. Pour voir les valeurs d'activité et de volume, placer le curseur sur un des points du graphique.

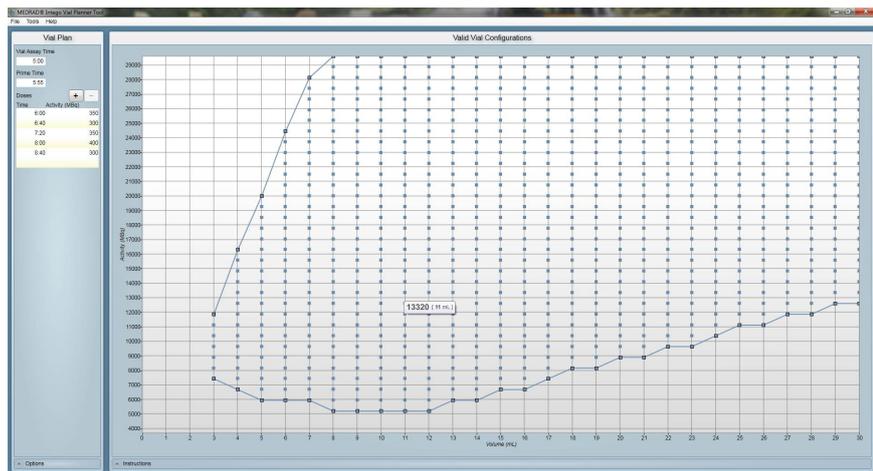

Remarque: Les renseignements affichés sont fictifs et ne représentent pas une dose ou un patient précis.